

Varrox Verdampfer - zum Verdampfen von Oxalsäure

Art-Nr.: 40005 / GTIN: 7640166141426 / Hersteller: [Andermatt BioVet](#)



140,00 EUR / Stk

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
~~Do. 06. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)



Produktinformation

Imkerei, Bienen, Biene, Apis mellifera, Bienenvolk, Honigbiene, Bienenstock, Imkerei,
Schlagworte: Varroamilbe, Varroabefall, Varrose, Milbe, Varroamilbe, Spritze, Oxalsäure, Oxalsäure-
Dihydrat, API-Bioxal, Oxalsäurenebel, Nebel, verdampfen, Verdampfer, Winterbehandlung

Bildquellen: Andermatt BioVet

ACHTUNG

Oxalsäure ist beim Einatmen für den Menschen extrem schädlich - BITTE AUSSCHLIEßLICH MIT GEEIGNETEM
ATEMSCHUTZ (FFP3) ANWENDEN

Beschreibung

Mit dem Varrox Verdampfer lassen sich Bienen bei Außentemperaturen um 5°C schonend bei minimaler
Störung mit Oxalsäurenebel behandeln.

Anwendung/Dosierung

Der durch Erhitzen von Oxalsäure-Dihydrat entstehende Nebel bedeckt alle Bienen und Oberflächen mit
Oxalsäure-Kristallen. Diese Kristalle sind für die Bienen gut verträglich, für Varroamilben allerdings tödlich. In
brutfreien Völkern kann eine Wirkung von bis zu 96% erzielt werden. Die beste Anwendungszeit liegt zwischen
Mitte November und Ende Dezember, die Idealtemperatur um die 5°C. Das Pfännchen wird mit 1 – 2 g
Oxalsäure-Dihydrat (je nach Zargengröße) befüllt, unter die Wintertraube geschoben und für 2,5 Minuten
einer Autobatterie angeschlossen. Danach wird der Verdampfer von der Batterie getrennt, noch 2,5 min ohne
Strom in der Beute belassen, aus der Beute gezogen und im Wasserkübel abgekühlt, das Flugloch wird für
weitere 10 Minuten mit einem feuchten Tuch verschlossen.

Inhalt

1 Varrox Verdampfer (inkl. Heizpfännchen, Schutzblech, 3 m Kabel mit 2 Batterieklemmen, 2 Messlöffel)

Anmerkung

- ul {list-style-type: disc ;}
- Voraussetzung: Mindestgröße des Fluglochs beachten (h 14 mm, b 90 mm)
- Stromversorgung: Autobatterie 12 Volt / 12 Ampere
- Leistung: 150 W

Anwendungszeitraum

geeignet für die Winterbehandlung

Kombination:

Api-Bioxal

Schutzmaske
